

操作提示和方法



警告

当您引导气管内导管 (ETT) 到达视频喉镜的远端时，确保将您的视线落在患者的口腔而不是视频显示器屏幕上。否则，可能导致扁桃体或软腭受伤。

4 步法

1. **查看口腔：**用左手拿着视频喉镜叶片，将其插入口咽的中线。
2. **查看屏幕：**找到会厌，然后操纵叶片以获得最佳声门视图。
3. **查看口腔：**小心地将导管远端插入靠近叶片顶端的位置。
4. **查看屏幕：**根据需要轻轻地旋转导管或调整其角度以将其重新定向，从而完成插管操作。

叶片插入提示

- 沿舌头的中线将叶片插入到会厌。
- 使用 GlideScope 视频喉镜执行插管时需要大约 0.5-1.5 kg (1.1-3.3 lbs) 的上抬力。
- 建议使用气管内导管的管芯。GlideRite® 刚性管芯设计用于补充成人尺寸叶片的角度。可以 60–90° 的角度使用展性管芯。
- 为协助气管内导管 (ETT) 通过，请在轻轻推进 ETT 时让管芯缩回大约 5 cm (2 in)。将叶片缩回 1 cm (0.4 in) 还可能有益于缩小视角，让声门下移。



快速入门


安装视芯和视芯套

1. 选择合适的视芯套（一次使用型叶片）和视芯。
2. 将视芯插入视芯套，然后按压视芯的底部直至锁定到位。
3. 在显示屏的右侧，托架后面，将电缆上的箭头对准端口处的箭头，然后插入电缆接头直至听到“咔嗒”一声。

准备系统

4. 在显示屏上，将电源开关移到左边。
5. 确保电池已充满电。绿色电源指示灯不闪烁。
6. 确认显示屏显示的是从视芯接收的图像。可以在顶部或左上方看到一小部分视芯套。

部分组件在使用前必须消毒。详细说明，请参阅操作和维护手册。

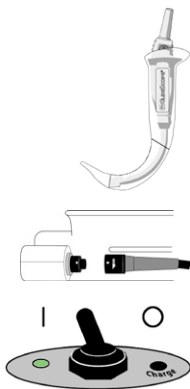

Verathon Medical China Sales

上海儒博贸易有限公司
地址:上海市普陀区岚皋路567号品尊国际B座601室
电话: +86 021 33773550, 传真: +86 021 33773559
邮箱: China@verathon.com
网页: verathon.com